



- Форма головки винта обеспечивает комфорт пациенту
- Отверстие в головке для создания конструкции с использованием лигатур и ортодонтических дуг
- Борозда в головке для легкого наложения эластиков
- Полированная трансгингивальная часть конической формы для предотвращения инфицирования
- Высокая прочность и биосовместимость материала (сплав Ti6Al7Nb)
- Асимметричная резьба для надежной фиксации в костной ткани
- Заострение резьбовой части для упрощения установки

Консультации:

д.м.н., профессор Слабковская Анна Борисовна, телефон: (495) 611-20-44

Разработан кафедрой ортодонтии и детского протезирования
Московского государственного медико-стоматологического университета


ООО "КОНМЕТ"

Россия, 125413, Москва, Онежская ул, д. 24, стр.1

Тел.: (495) 234-91-13, Факс: (495) 232-19-31

e-mail: conmet@conmet.ru www.conmet.ru

Протокол установки ортодонтических мини-имплантатов КОНМЕТ

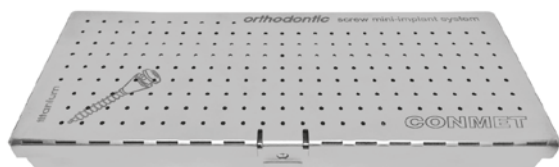


Кат. №	Наименование
600.00	Кассета - стерилизатор

1.2

1.5


2.0

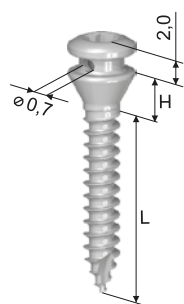

Кат. №	L, мм	H, мм	Цветовая маркир.
603.11	8	0,5	Желтый
603.12	10	0,5	Желтый
603.21	8	1,5	Синий
603.22	10	1,5	Синий
603.31	8	2,5	Розовый
603.32	10	2,5	Розовый

Кат. №	L, мм	H, мм	Цветовая маркир.
602.11	8	0,5	Желтый
602.12	10	0,5	Желтый
602.21	8	1,5	Синий
602.22	10	1,5	Синий
602.31	8	2,5	Розовый
602.32	10	2,5	Розовый
602.20	6	1,5	Зеленый

Кат. №	L, мм	H, мм	Цветовая маркир.
601.11	8	0,5	Желтый
601.12	10	0,5	Желтый
601.21	8	1,5	Синий
601.22	10	1,5	Синий
601.31	8	2,5	Розовый
601.32	10	2,5	Розовый

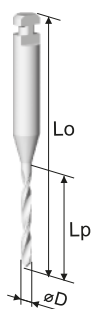

Кат. №	Lo, мм	Lp, мм	D, мм
643.01	21	7	0,95
643.02	23	9	0,95
643.03	44	8	0,95

Кат. №	Lo, мм	Lp, мм	D, мм
642.01	21	7	1,2
642.02	23	9	1,2
642.03	44	10	1,2

Кат. №	Lo, мм	Lp, мм	D, мм
641.01	21	7	1,6
641.02	23	9	1,6
641.03	44	11	1,6



Кат. №	S, мм	L, мм
632.01	1,0	20
632.02	1,0	25

Кат. №	S, мм	L, мм
632.01	1,0	20
632.02	1,0	25


Кат. №	S, мм	L, мм
631.01	1,2	20
631.02	1,2	25



Кат. №	Наименование
522.11	Жало сменное

Кат. №	Наименование
522.11	Жало сменное

Кат. №	Наименование
622.11	Жало сменное

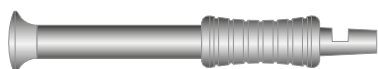

522.00 Рукоятка поворотная универсальная

ООО "КОНМЕТ"

Россия, 125413, Москва, Онежская ул, д. 24, стр.1 • Тел.: (495) 234-91-13, Факс: (495) 232-19-31

e-mail: conmet@conmet.ru www.conmet.ru

ORT_v.5-11.2023